



Rekvisisjonskode Legens ID-nummer

POL / LEGEK .

(Navn, adr)

Ref.nr. for pasientkobling

Fødselsdato Personnr

Etternavn Fornavn

Adresse

Postnr Poststed

Kopisvar til:  
(Navn, adr)

Betales av

Helfo  
 Institusjon  
 Bedriftshelsetjeneste

Kvinne  
 Mann

Prøvetakingsdato

d d m m å å

Tidspunkt

t t m m

**URINKONTROLL VED PRØVETAKING**

Temp:

Utseende:

**MEDIKAMENTER SISTE 30 DØGN**

Navn	Dose	Startet dato	Siste dose
<input type="checkbox"/> Buprenorfin			
<input type="checkbox"/> Metadon			

**Analyse urinprøver**

÷72  Rusmiddelpakke:

- Amfetamin\*
- Benzodiazepiner\*
- Opiater\*
- Cannabis\*
- Kokain
- Etanol
- Buprenorfin
- Metadon
- Zopiklon
- Meprobamat
- Metylfenidat
- Zolpidem
- Pregabalin
- Tramadol
- Oksykodon
- Norfentanyl
- GHB
- Kreatinin og pH

Andre analyser

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

+

\* Påviste prøvesvar bekreftes med spesifikk metode

Prøvetaking:  
Prøven avlegges i en ren beholder og urinen trekkes opp i Urin-Monovette®. Se egen bruksanvisning på baksiden av rekvisisjonen. Glasset merkes med strekkode-etikett. Etiketten festes på langs midt på glasset med LID øverst.

**Ønskelig med 1 glass pr. rekvisisjon.**

+

QR kode med Link til veilederen:



URIN

URIN

URIN

URIN

**Kliniske opplysninger / Kommentar**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# BRUKSANVISNING

## URIN-MONOVETTE®

- 1 Trekk opp urin fra beger, flaske, bekken eller lignende ved hjelp av Urin-Monovette® - spissen.
- 2 Trekk opp urin til **Stopp-streken**. Løft opp Urin-Monovetten® og trekk stempelet helt ned, slik at spissen tømmer seg og det kommer litt luft inn i glasset.
- 3 Kast spissen, sett på hetten, brekk av stempelet og kast det. Unngå overfylt glass. Det bør være minst 1 cm synlig luft mellom urin og lokk.

